

دورامش

Audio company (Italy)

کاربرد دورامش جلوگیری از نشت CSF میباشد.



ویژگی ها:

- تهیه شده از غشای پریکارد اسب به دلیل مصونیت اسب در قبال بیماری جنون گاوی
- جایگزین بیولوژیکی دورای واقعی
- تقویت دورای واقعی
- قابلیت جذب دورا در طول 3 ماه
- آسلولار
- زیست سازگار
- مقاوم و کم ضخامت
- سازگاری خوب با هر آناتومی
- شفافیت دورا و امکان دید در طول جراحی

طریقه مصرف:

- قرارگیری در یک بسته دابل استریل و استریل شده با اشعه بتا
- قرار گرفتن در محلول سالین پس از باز کردن بسته باید به مدت حداقل 1 دقیقه
- قابل برش به سایزها و شکل های مختلف
- همپوشانی حدود 1 سانتی متر با دورا برای چسبندگی مناسب
- قابل استفاده با بخیه و یا چسب (با چسب فیبرین) و یا هر دو
- در صورت استفاده از چسب برای فیکس کردن دورا باید ناحیه کاملا خشک باشد و هموستاز شود
- نگهداری بین دماهای 2-25 درجه